

対面型 感染予防対策 高機能 ボディパウチの使用方法

【ご使用方法とご注意】必ずお読みください。

- マスク、ディスポーザブルグローブ、プラスチックエプロンまたはガウンを着用してご使用ください。
- ご遺体は、側臥位に体位交換をしてボディパウチに納めてください。側臥位にする際は、鼻腔・口腔から血液・体液等が流出する可能性があるため、フラット型紙オムツ又は吸収シートを鼻・口にあて、高リスク体液との接触に注意して静かに行ってください。
- ボディパウチが空気で膨隆した場合は、チャックを完全に閉める前に空気を抜いてください。
- 途中でスライダーが外れた場合やチャックが開いた場合は、スライダーをいったん外し、端に取り付けて再度チャックを閉めてください。スライダーは取外し可能部品です。不良品ではありません。
- ボディパウチのチャック部分を持って納棺すると、ボディパウチが破損する恐れがあります。納棺の際は、ご遺体の背部に手を入れ、重心が下がらないように納棺してください。



- ・ボディパウチのチャックを手で開けておく。
- ・ご遺体の顔をフラット型紙オムツ又は吸収シートでしっかり押さえて側臥位にし、ボディパウチの白い部分を身体の下へ入れる。



ボディパウチの上側をご遺体へ向かって巻き、脇の下へ入れる。



巻いたボディパウチを乗り越えて、反対側へ側臥位に体位交換し、ボディパウチを広げる。
(白いマチが広がり、身体の背面になる)



ご遺体を仰臥位に戻しチャックを閉める。鼻・口にあてたフラット型紙オムツ又は吸収シートを外し寝衣を整える。頭部側からスライダーを動かしてチャックを閉じる。※ボディパウチが空気で膨隆した場合は、チャックを完全に閉める前に空気を抜いてください。